

1. Inleiding



SK526 Skan bedgalg

Vrijstaande metalen bedgalg op H-voet.

Deze bedgalg bestaat uit 2 delen, t.w. een H-voet en een staander welke over de buis van de voet wordt geplaatst.

De bedgalg wordt compleet met triangel en nylon band, haak ter bevestiging van de band en 2 sterknoppen ter bevestiging van de staander geleverd.

Heeft 6 bevestigingsgaten voor de triangel met een hoogte van 179 – 210 cm.

Breedte voet 88 cm

Lengte voet 88 cm

Max. draagvermogen 125 kg.

Alle onderdelen zijn los leverbaar.

2. Inhoud

H-voet, staander, triangel, nylonband, haak en 2 sterknoppen.

3. Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan in binnenruimtes.
2. Alleen gebruiken op vlakke en stevige ondergrond.
3. De bedheffer/papegaai is alleen bedoeld voor het zelfstandig oprichten op bed of in een stoel.
4. Het is ten strengste verboden om het artikel te gebruiken voor een transfer van de ene plaats naar een andere.
5. Let op voldoende afstand bij in hoogte verstelbaar bed of stoel.
6. Overschrijding van het maximaal toelaatbaar gewicht is niet toegestaan. De totale belasting mag maximaal 80 kg zijn, dit betekent dat het voor patiënten tot 125 kg bruikbaar is.
7. Berg het artikel niet buiten op. Berg het artikel niet op in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.

SKAN-STAAAL B.V.



Mandenmakerstraat 35A – 3194 DA Hoogvliet (Holland)

Xxxxxxxxxx User Instructions

8. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
9. Controleer voor gebruik of de triangel correct bevestigd is en niet versleten.
10. Bij eventueel defect aan het hulpmiddel dient u direct contact op te nemen met uw leverancier.
11. Gebruik het artikel niet indien het versleten is.

4. Plaatsing en afstelling

1. Plaats het artikel achter het hoofdeinde van het bed of aan het rug deel van de stoel. Nooit de bedheffer/papegaai aan de zijkant van het bed of rolstoel zetten.
2. Afstelling van de triangel geschiedt door middel van de metalen pin aan de bovenzijde van het frame in het gewenste gat te plaatsen. Zorg er voor dat wanneer de triangel vastgepakt wordt en hieraan opgetrokken wordt, deze verticaal onder het frame blijft (zie afbeelding hieronder).
3. Vervolgens kan de hoogte van de triangel aangepast worden, door de lengte van de lus te verlengen of verkorten.

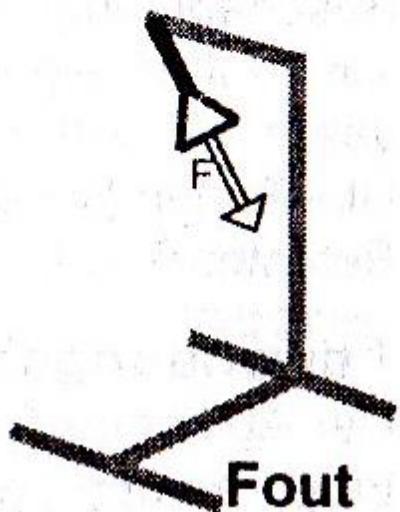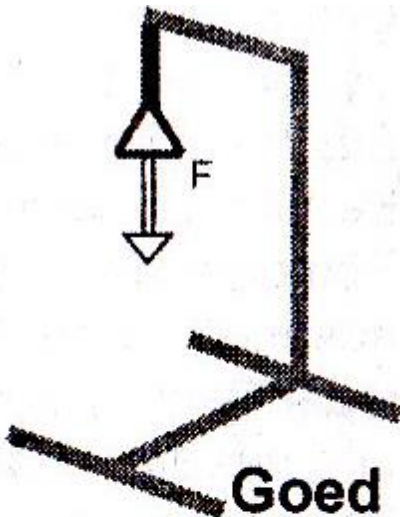

SKAN-STAAL B.V.

Mandenmakerstraat 35A – 3194 DA Hoogvliet (Holland)

Xxxxxxxxxx User Instructions

5. Reinigen/ Schoonmaken

Dit product kan worden gereinigd met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.

6. Onderhoud Eisen

Controle bevestiging triangel en staat van de band.

7. Waarschuwingen / Speciale instructies

ALS er enig teken van beschadiging of FOUT BIJ HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN.

Het product heeft een maximale gewicht van de gebruiker limiet van 125 KG en dit wordt geassocieerd met normaal gebruik en uitsluitend voor normaal gebruik.

Het is sterk aanbevolen dat een volledige risicobeoordeling voor uitgifte en het gebruik wordt uitgevoerd door de patiënt, waaronder een volledige milieu-analyse, het product heeft een specifiek ontwerp en het beoogde gebruik, maar de patiënt en de omgeving kan dit moeilijk te realiseren maken.

8. Garantie

Uw product wordt geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop, het dekt fabricagefouten die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik het verstrekken van instructies voor de gebruiker zijn gevolgd, misbruik of opgelopen schade zal niet onder deze garantie worden gedekt.

NIET GEBRUIKEN BIJ FOUT OF SCHADE.

9. Verwijdering Regelingen

Voorafgaand aan verwijdering vervolgens geschikte ontsmetting van het product moet worden uitgevoerd volgens de plaatselijke regelingen, het product en / of de onderdelen kunnen worden verwijderd zonder enige mogelijke gevaren voor het milieu, mits de plaatselijke recycling regelingen worden gezocht en aangehouden worden uitgevoerd

10. Contactgegevens

Mocht u vragen heeft over dit product neem dan contact op met uw distributeur in eerste instantie anders contact opnemen met: Skan-Staal B.V. Mandermakerstraat 35a,3194 DA Hoogvliet, Netherlands, info@skanstaal.nl, 010 501 75 30