

Euroflex Arbetstol

Sprängskiss

Utg.003 2019-01-22

Bild nr. 1

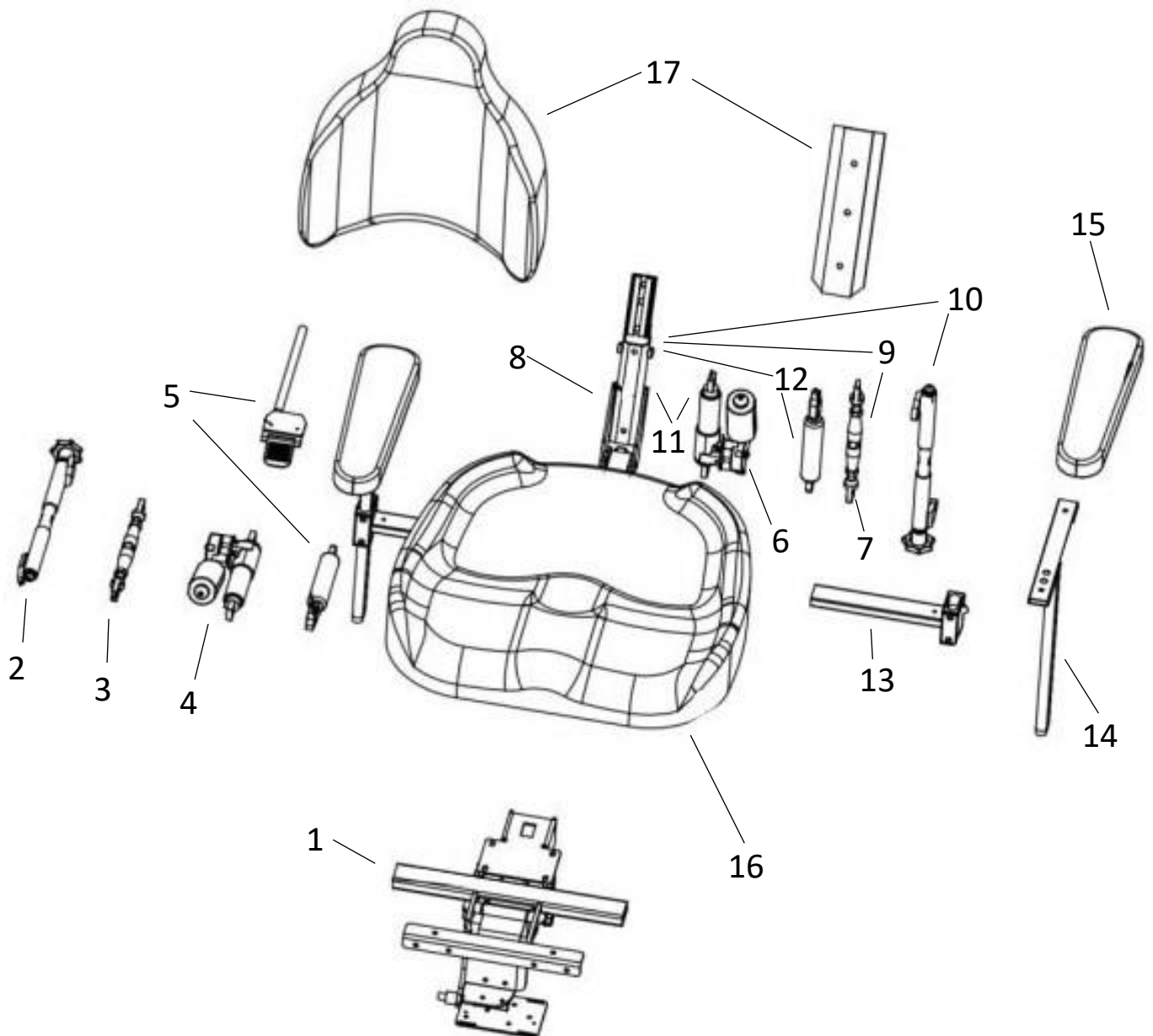


Bild 1 artikellista:

1. 800010-1950 Sittkryss Euroflex kpl.
2. 800010-1953 Tilt med vev
3. 800010-1952 Tilt manuell
4. 224102-8000 Ställdon, Nya tiltkrysset, 12V 50mm
5. 800010-1955 Tilt med gaskolv
6. 224103-8010 Ställdon Multirygg, 12V 40mm
7. 229001-6008 Ryggvinkling ryggstång manuell
8. 227001-6200 Multirygg, Komponenthanterad
9. 227001-6000 Multirygg med manuell inställning
10. 227001-6100 Multirygg med vev
11. 227002-6100 Multirygg med El-ställdon 12V
12. 227003-6000 Multirygg med gasjustering
Se sidan 2 & 3 för mer om multirygg
13. 634001-4012 Breddjustering – Kort Standard
624001-4012K Breddjustering Lång – för bredd 50cm
14. 624001-4010K Armstöd höjdjustering Classic
15. 624002-4004 Armstödsplatta mjuk 30x3 cm
Fler alternativ till armstöd nedan.
624001-4004-S Armstödsplatta mjuk 30x5cm
624003-4004 Armstödsplatta PU 30x3cm
624002-4007 Armstödsplatta mjuk 40x3cm
624001-4007 Armstödsplatta mjuk 40x5cm
16. SitRite sits, olika alternativ på storlek
624520-4040 Sits SitRite 40x40
624520-4045 Sits SitRite 40x45
624520-4545 Sits SitRite 45x45
624520-4550 Sits SitRite 45x50
624520-5050 Sits SitRite 50x50
17. SitRite Rygg, olika alternativ på storlek och tillbehör.
Alla ryggdynor säljs med aluminiumskenan fast skruvad.
224525-3640 Rygg SitRite 37x43
224525-3640-B SitRite rygg 37*43 kpl inkl. bålstödförstärkning
224525- 3640-S SitRite rygg 37*43 kpl inkl. Svankstöd
224525-4245 Rygg SitRite 42x45
224525-4245-B SitRite rygg 42*45 kpl inkl. bålstödförstärkning
224525-4245-S SitRite rygg 42*45 kpl inkl. Svankstöd
224525-4550 Rygg SitRite 47x47
224525-4550-B SitRite rygg 47*47 kpl inkl. bålstödförstärkning
224525-4550-S SitRite rygg 47*47 kpl inkl. Svankstöd

Bild nr. 2
Multirygg
(med manuell inställning)

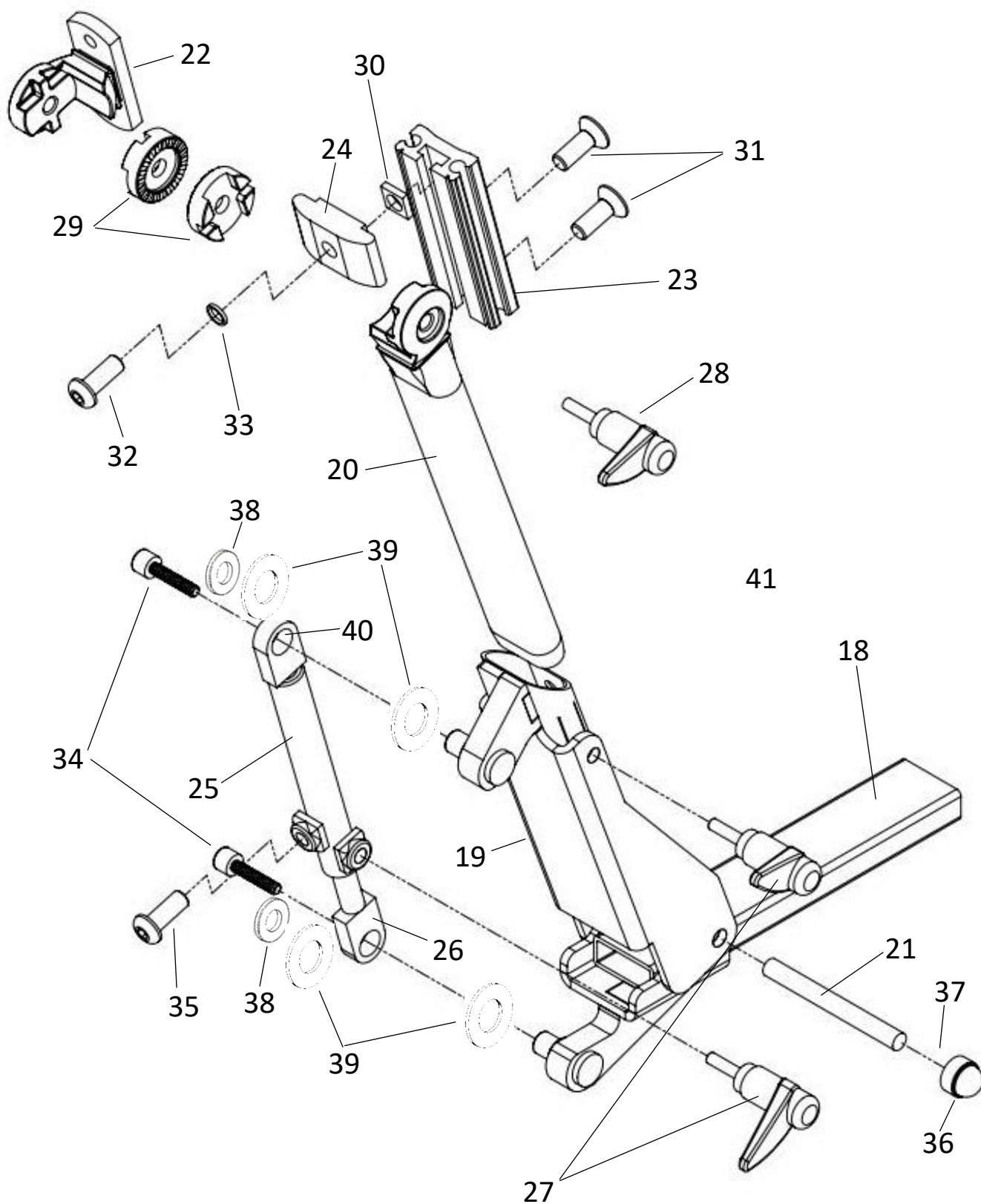


Bild 2 artikellista:

| | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 18. | SW-01985 | Ryggstolpe, nedre del |
| 19. | SW-01992 | Ryggstolpe, Övre del |
| 20. | SW-02034 | Ryggstolpe Multirygg |
| 21. | SW-01999 | Pinnbult M8, Multirygg |
| 22. | 274001-6005 | Profilinfästning |
| 23. | 674001-6004 | Profil Ryggstolpe ABC |
| 24. | 675002-4400 | AL-Profil låsklack ABC |
| 25. | SW-01993 | Justerdon, ryggstolpe |
| 26. | SW-01997 | Stång justerdon, ryggstolpe |
| 27. | 7WN5000-8*16 | Låsspak WN 500 65-M8*16 |
| 28. | 7MRP-63-8*30 | Låsspak MRX 63p-M8*30 |
| 29. | 624001-9000 | Kugglås |
| 30. | 7ML4M-8 | Fyrkantsmutter M8 FZB |
| 31. | 7F6S-8*22 | Skruv MF6S-M8*22 FZB |
| 32. | 7K6S-8*25 | Skruv K6S M8*25 Svartkrom |
| 33. | 7BRB-8,4*16 SK | Planbricka 8,4*16*1,5 Svartkrom |
| 34. | 7MC6S-5*10 LOCK | Skruv MC6S-M5*10 Fzb, LOCK-TITE |
| 35. | 7K6S-8*12 | Skruv kullrig K6S M8*12 Svartkrom |
| 36. | 7KH-13-8 | Mutterskydd M8 |
| 37. | 7LOCKING-M8L | Låsmutter M8 DIN 985 FZB |
| 38. | 7BRB-5,3*10 | Bricka 5,3*10*1 FZB |
| 39. | 7PLASTB-10,5*18 | Plastbricka 10,5*18*1,0 |
| 40. | 7BM-1008-FB | Dry star smörjfribussning 10*12*8 |
| 41. | 2FJL-6*80E | FJ-LÅS 6*80 ENK NITAD |

Nr: 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 =

227004-6000

Ryggstolpe multirygg sitrite/bas

Bild nr. 3
Flexbase underrede
med chassimonterad broms

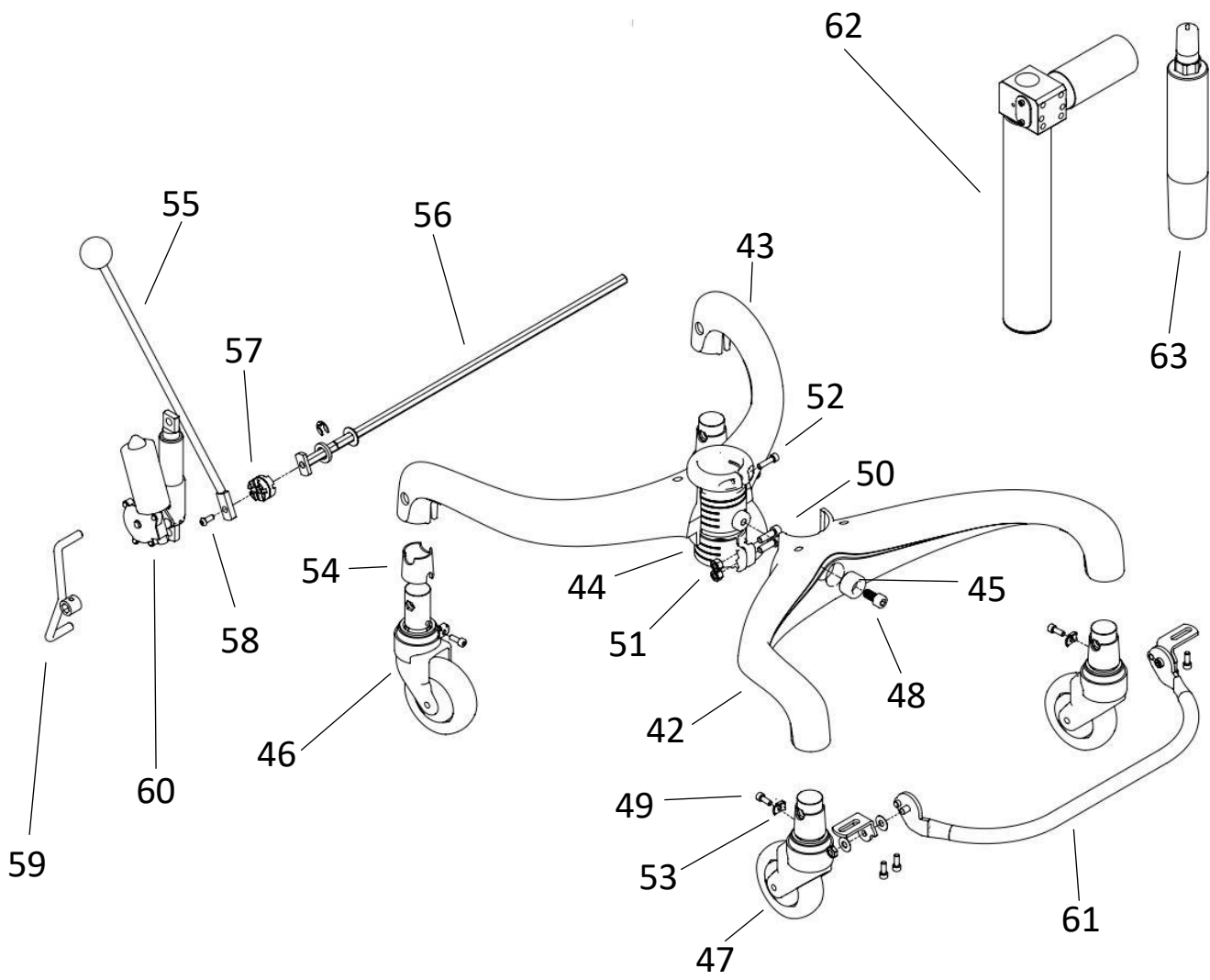


Bild nr. 4
Flexbase underrede
med sitsmonterad broms

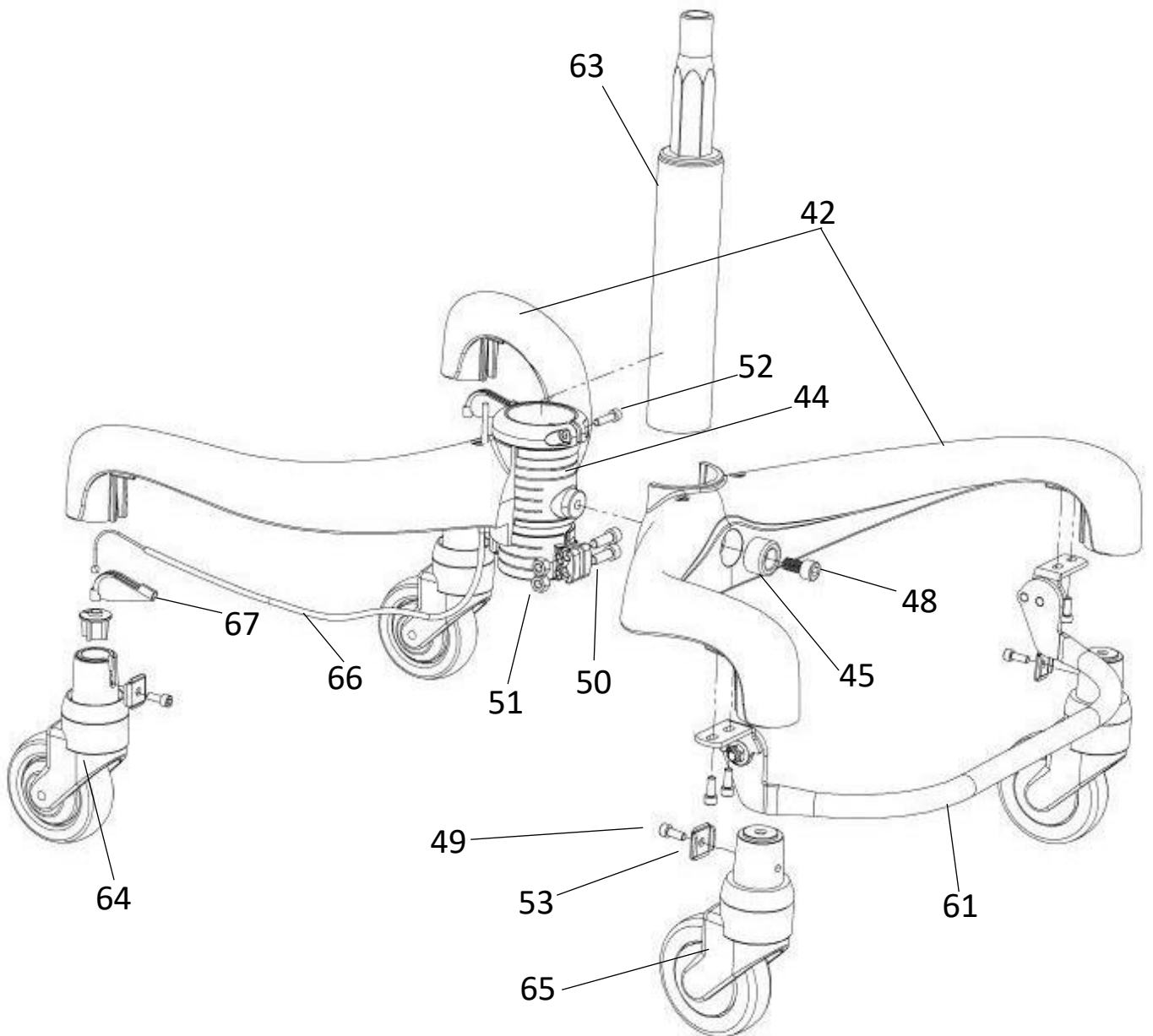


Bild 3 & 4 artikellista:

| | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|
| 42. | SW-00405 | Benhalva Forma chassi |
| 43. | SW-00405-B | Benhalva Forma chassi Bearbetad |
| 44. | SW-00404 | Klämhylsa Forma chassi |
| 45. | SW-00403 | Bricka Forma chassi |
| 46. | SW-00346T | Länkhjul 100mm, Centrallåst |
| 47. | SW-00329T | Länkhjull 100mm, Obromsat |
| 48. | 7MC6S-10*22 | Skruv MC6S M10*22 FZB |
| 49. | 7MC6S-6*16 | Skruv MC6S M6*16 |
| 50. | 7MC6S-8*25 | Skruv MC6S M8*25 |
| 51. | 7LOCKING-M8L | Låsmutter M8 |
| 52. | 7MC6S-6*20R | Skruv MC6S M6*20 A2 Rostfri |
| 53. | SW-01544 | Låsbricka Hjul, Forma, FZB |
| 54. | SW-01543 | Styrhylsa hjul Forma chassi |
| 55. | 684001-1030 | Bromsspak 200/700 |
| 56. | SW-01542 | Bromsstång 6-Kant, Forma spak |
| 57. | 624001-9000 | Kugglås |
| 58. | 7K6S-8*35 | Skruv Kullrig K6S M8*35 Svartkrom |
| 59. | 234001-1100 | Fotbromspedal Kpl. Mittmonterad |
| 60. | 800050-1000 | Elbroms Forma |
| 61. | SW-00884 | Fotring Forma, Spak |

Ställdon finns i två olika längder.

| | | |
|-----|-------------|-------------------------------------|
| 62. | 249102-8000 | Ställdon 2/3/4/700 kort D=57 Sl.180 |
| | 249101-8000 | Ställdon 2/3/4/700 lång D=57 Sl.250 |

Gashöjning finns i 3 längder & men 3 olika Newton krafter.

| | | |
|-----|-------------|----------------------------------|
| 63. | 227220-0085 | Gaskolv brukarvikt <50kg (220N) |
| | 227220-0160 | Gaskolv brukarvikt <50kg (220N) |
| | 227220-0200 | Gaskolv brukarvikt <50kg (220N) |
| | 227320-0085 | Gaskolv brukarvikt <90kg (350N) |
| | 227320-0160 | Gaskolv brukarvikt <90kg (350N) |
| | 227320-0200 | Gaskolv brukarvikt <90kg (350N) |
| | 227450-0085 | Gaskolv brukarvikt <140kg (450N) |
| | 227450-0160 | Gaskolv brukarvikt <140kg (450N) |
| | 227450-0200 | Gaskolv brukarvikt <140kg (450N) |
| 64. | SW-00346 | Hjul 100mm broms Forma |
| 65. | SW-00329 | Hjul 100mm obroms Forma |
| 66. | SW-00410 | Broms wire XLforma chassi |
| 67. | SW-00312 | Wire Guide Forma chassi |

Bild nr. 5
Bromspaket
(till sitsmonteradbroms)

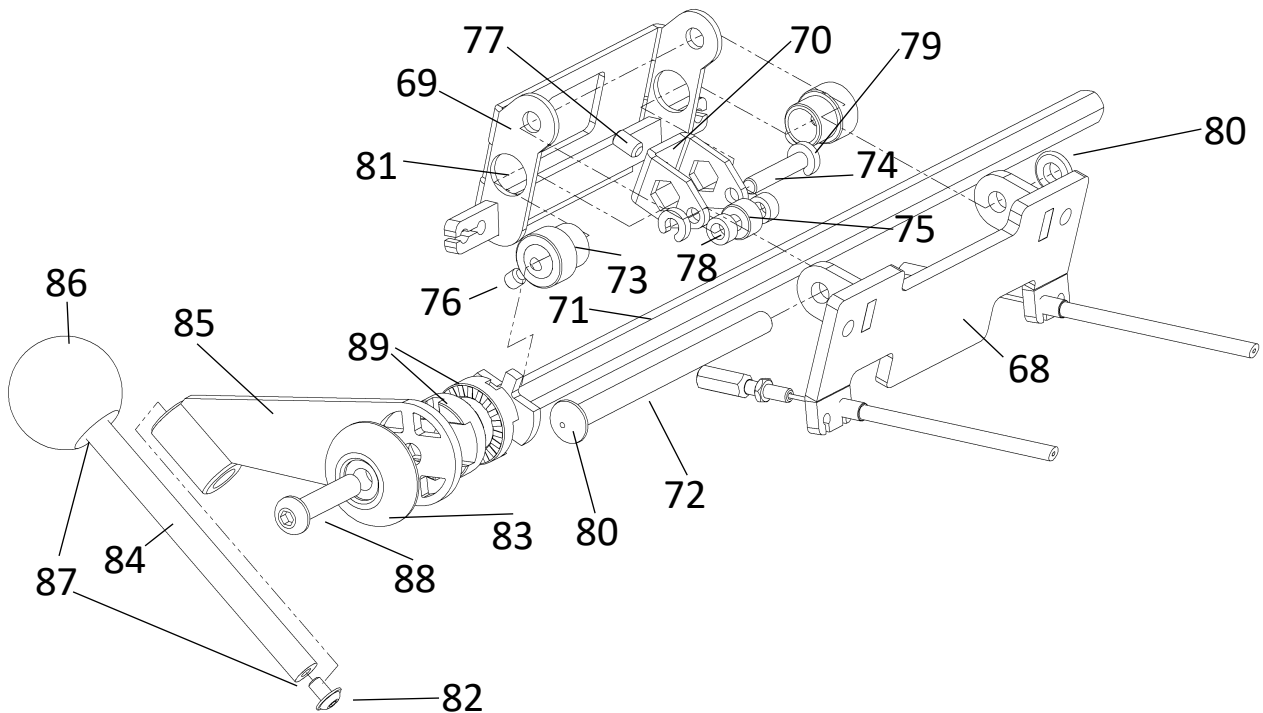


Bild 5 artikellista:

| | | |
|-----|-----------------|------------------------------|
| 68. | SW-00840 | Broms plåt fast |
| 69. | SW-00841 | Bromsplåtfäste |
| 70. | SW-00833 | Plåtsvep broms |
| 71. | SW-00844 | Broms Sexkantstång |
| 72. | SW-00838 | Broms axel |
| 73. | SW-00836 | Broms bussning |
| 74. | SW-00839 | Broms Axel 6mm |
| 75. | 604001-1032 | Nållager RNAO 6*13*8 |
| 76. | 7S6SS-M6*6 | Stoppskruv M6*6 |
| 77. | 7SK6SS-M6*10 | Stoppskruv M6*10 |
| 78. | 7DIST-6,2*10*5 | Distans 05-6-10-5 |
| 79. | 4017930147 | Starlock 6*11,5 |
| 80. | 76671-8 | Starlock m. kapsel 8mm |
| 81. | 7SGA-16 | Spårring SGA-16 |
| 82. | 7MK6SF-6*12 | Skruv Kullrig med fläns 6*12 |
| 83. | SW-00858 | Broms Svarvad Bricka |
| 84. | SW-00859 | Bromsspak förlängare |
| 85. | SW-00857 | Bromsspak Plåt |
| 86. | 7EBK50-SOFT | Knopp Broms |
| 87. | 7O-RING-9,3*2,4 | O-ring 9,3*2,4 |
| 88. | 7K6S-8*30SK | Skruv M8*30 |
| 89. | 624001-9000 | Kugglås |

Bild nr. 6
Forma Komfort/Aktiv
(För multirygg)

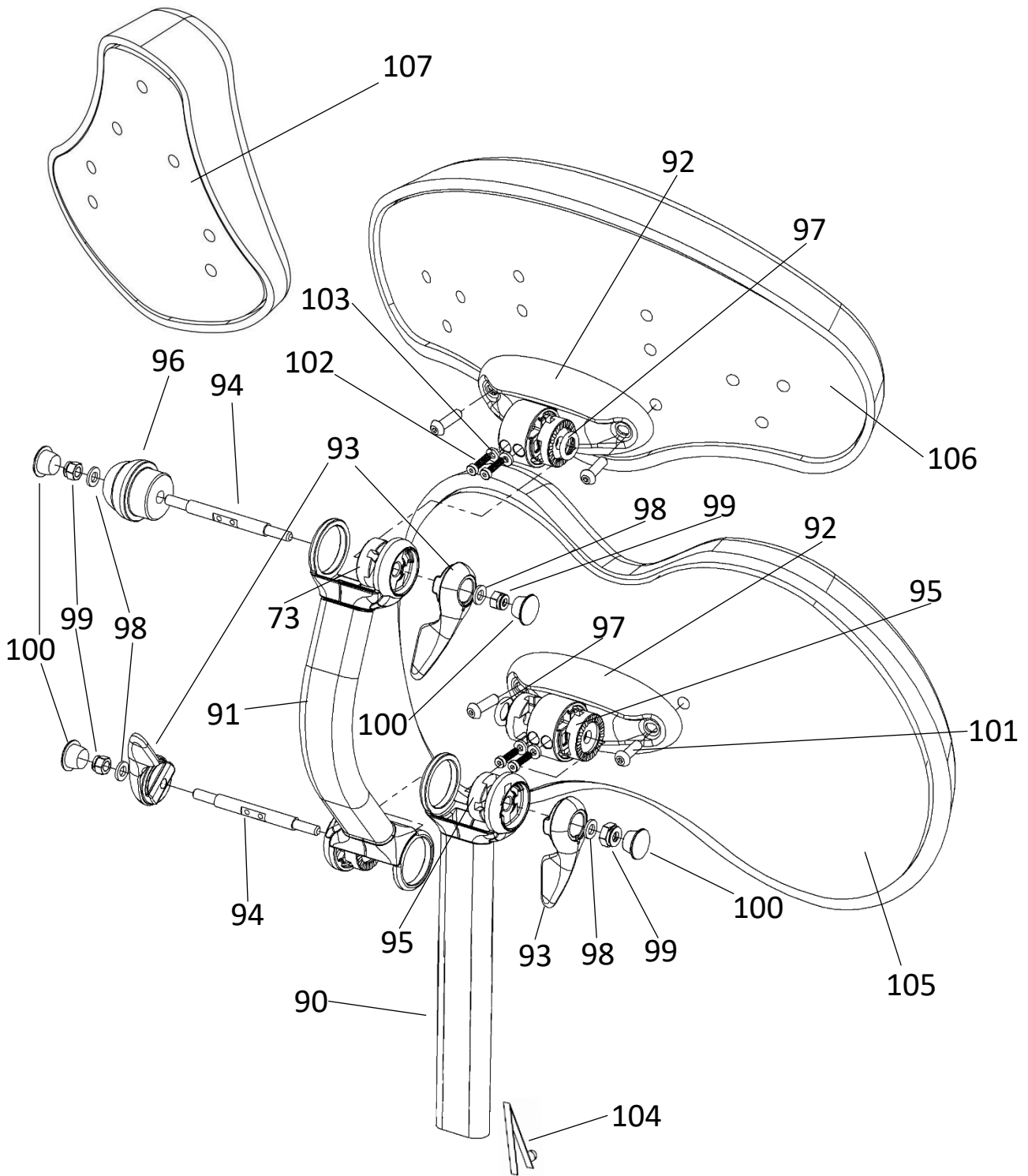


Bild 6 artikellista:

| | | |
|------|----------------|---------------------------------|
| 90. | SW-02087 | Ryggstolpe Forma för Multirygg |
| 91. | SW-00441 | Stolpe aktiv/Komfort rygg forma |
| 92. | SW-00435 | Basplatta ryggjoint forma |
| 93. | SW-00436 | Plastspak rygglås Forma |
| 94. | SW-00438 | Axel ryggjoint forma |
| 95. | 624001-9000 | Kugglås |
| 96. | SW-00437 | Blindplugg ryggjoint forma |
| 97. | 7O-RING-11x3,5 | O-ring |
| 98. | 7BRB-7*14 | Planbricka 7*14*1,5 |
| 99. | 7LOCKING-M6H | Låsmutter M6 |
| 100. | SWED-319154 | Täckpropp ryggjoint forma |
| 101. | 7K6S-6*20 | Skruv Kullrig K6S M6*20 Svart |
| 102. | 7MC6S-4*16R | Skruv MC6S M4*16 Rostfri |
| 103. | 7FBB-4,1*7,6 | Fjäderbricka 4,1*7,6*0,9 |
| 104. | 2FJL-6*80E | FJ-LÅS 6*80 |
| 105. | 801000-1003 | Ryggstomme Bas |
| 106. | 803000-1001 | Ryggstomme Komfort |
| 107. | 802000-1001 | Ryggstomme Aktiv |

Bild nr. 7
Forma Bas
(För multirygg)

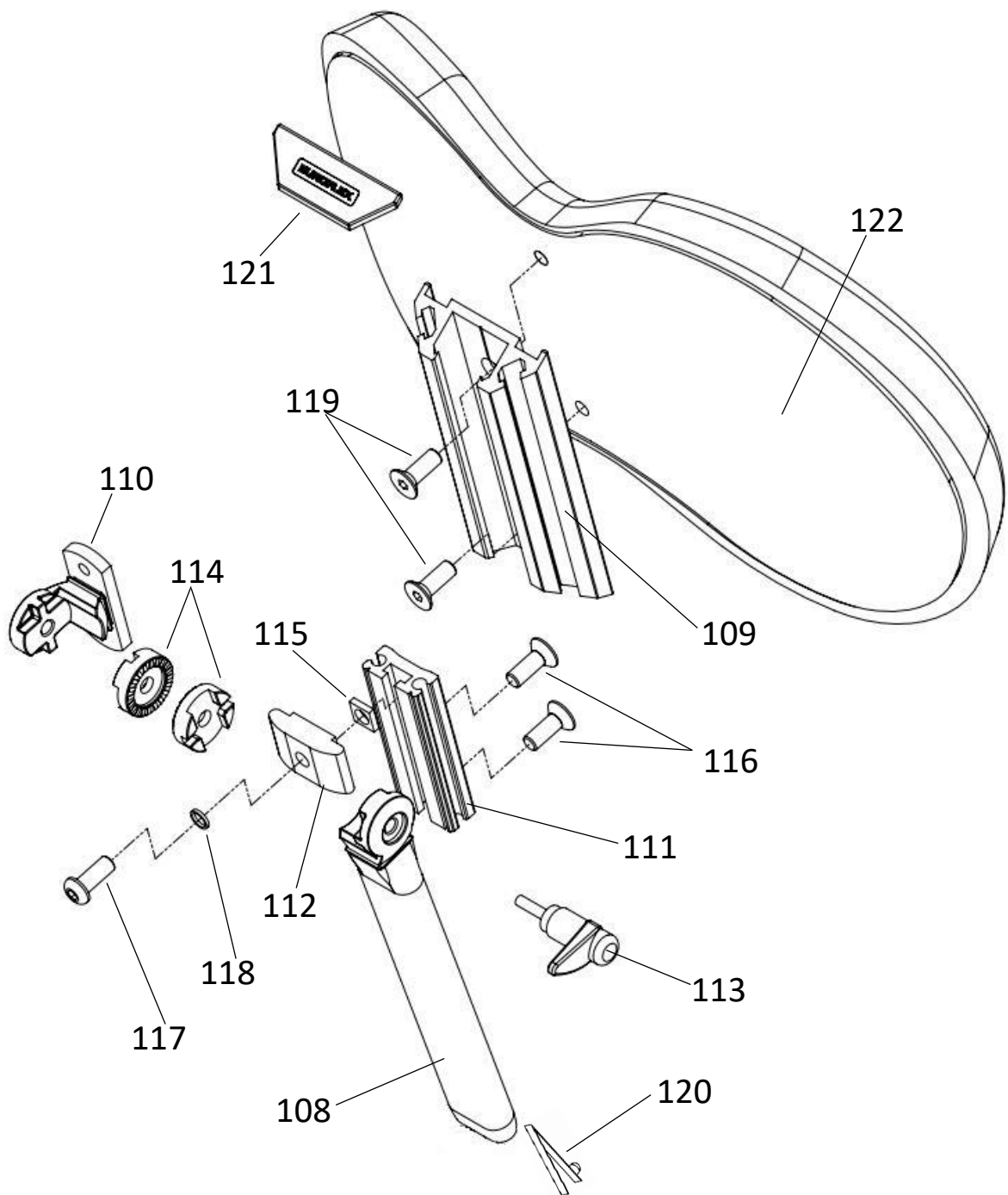


Bild 7 artikellista:

| | | |
|------|----------------|---------------------------------|
| 108. | SW-02034 | Ryggstolpe Multirygg |
| 109. | SW-01516 | Ryggprofil Basrygg |
| 110. | 274001-6005 | Profilinfastning |
| 111. | 674001-6004 | Profil Ryggstolpe ABC |
| 112. | 675002-4400 | AL-Profil låsklack ABC |
| 113. | 7MRP-63-8*30 | Låsspak MRX 63p-M8*30 |
| 114. | 624001-9000 | Kugglås |
| 115. | 7ML4M-8 | Fyrkantsmutter M8 FZB |
| 116. | 7F6S-8*22 | Skruv MF6S-M8*22 FZB |
| 117. | 7K6S-8*25 | Skruv K6S M8*25 Svartkrom |
| 118. | 7BRB-8,4*16 SK | Planbricka 8,4*16*1,5 Svartkrom |
| 119. | 7F6S-6*14 | Skruv MF6S-6*14 |
| 120. | 2FJL-6*80E | FJ-LÅS 6*80 ENK NITAD |
| 121. | SW-01502 | Cover Al-profil, ABC, SitRite |
| 122. | 801000-1003 | Ryggstomme Bas |

Bild nr. 8
SitRite
(För multirygg)

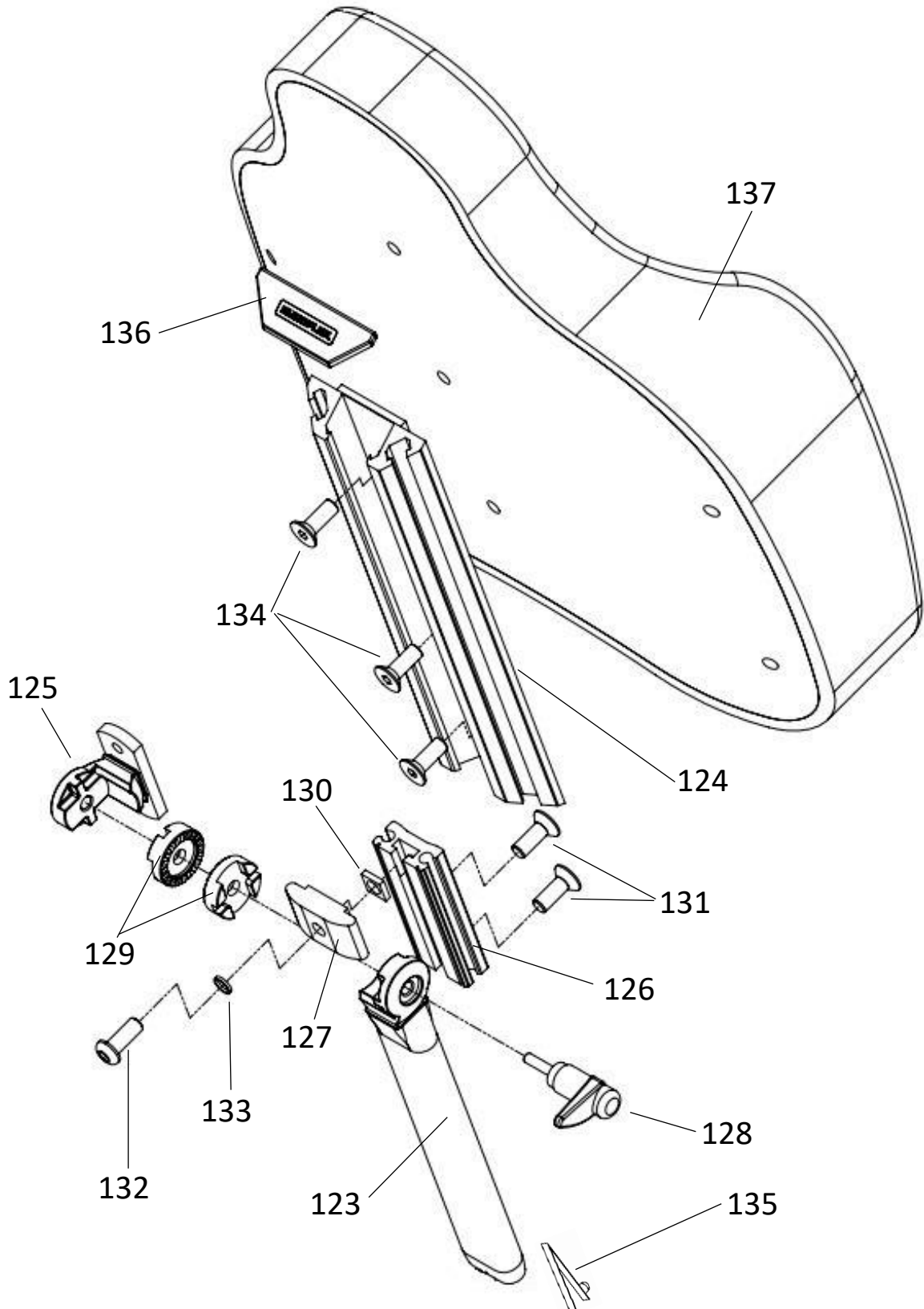


Bild 8 artikellista:

| | | |
|------|----------------|---------------------------------|
| 123. | SW-02034 | Ryggstolpe Multirygg |
| 124. | 674001-6001 | Ryggprofil ABC Hög 280mm |
| 125. | 274001-6005 | Profilinfastning |
| 126. | 674001-6004 | Profil Ryggstolpe ABC |
| 127. | 675002-4400 | AL-Profil låsklack ABC |
| 128. | 7MRP-63-8*30 | Låsspak MRX 63p-M8*30 |
| 129. | 624001-9000 | Kugglås |
| 130. | 7ML4M-8 | Fyrkantsmutter M8 FZB |
| 131. | 7F6S-8*22 | Skruv MF6S-M8*22 FZB |
| 132. | 7K6S-8*25 | Skruv K6S M8*25 Svartkrom |
| 133. | 7BRB-8,4*16 SK | Planbricka 8,4*16*1,5 Svartkrom |
| 134. | 7F6S-6*14 | Skruv MF6S-6*14 |
| 135. | 2FJL-6*80E | FJ-LÅS 6*80 ENK NITAD |
| 136. | SW-01502 | Cover Al-profil, ABC, SitRite |
| 137. | 624525-3640 | Ryggstomme SitRite 36*40 cm |
| | 624525-4245 | Ryggstomme SitRite 42*45 cm |
| | 624525-5050 | Ryggstomme SitRite 50*50 cm |

Bild nr. 9
Flexbase 52 underrede
med chassimonterad broms

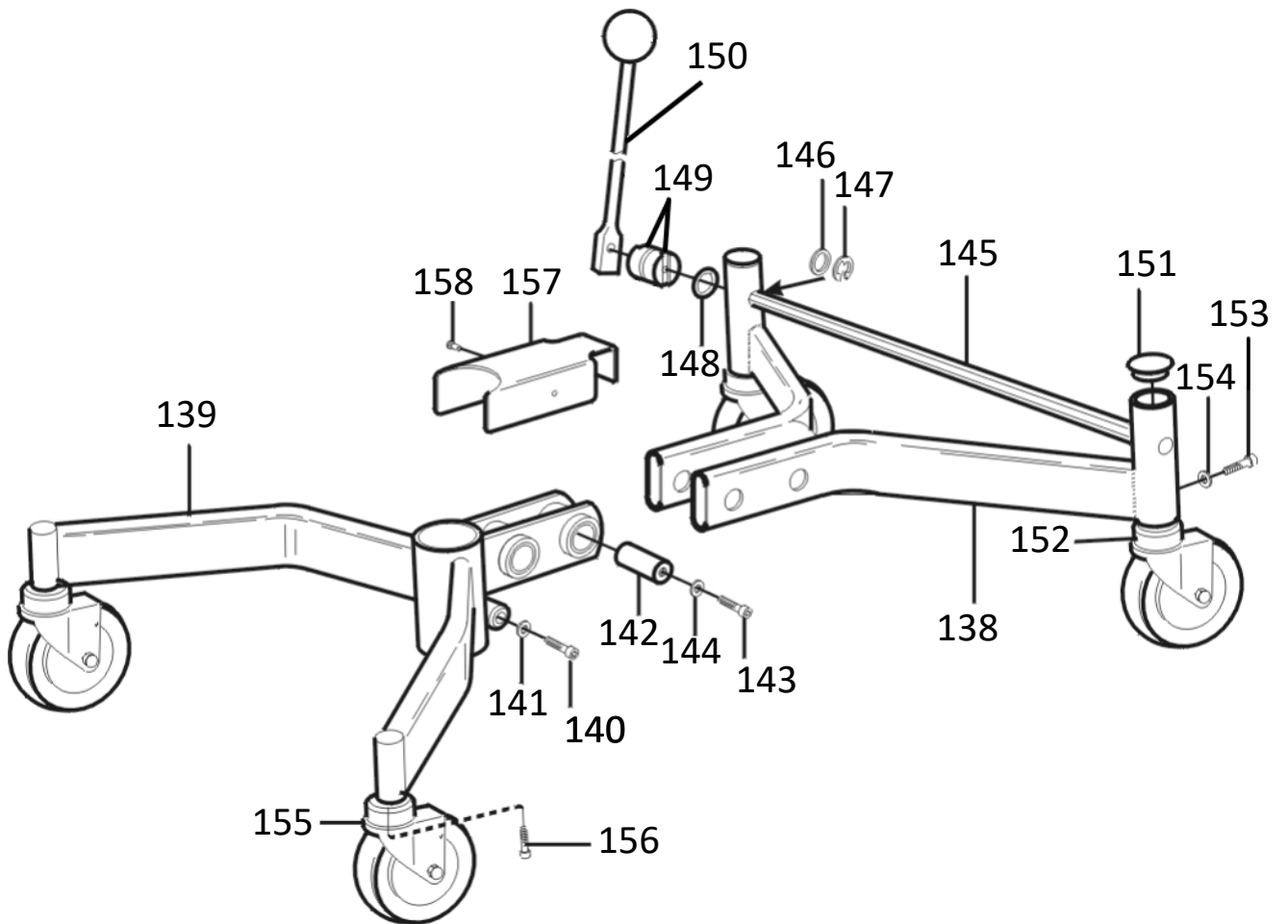


Bild 9 artikellista:

| | | |
|------|----------------|-------------------------------------|
| 138. | 689001-1000 | Ramdel bakre |
| 139. | 689001-1000 | Ramdel främre |
| 140. | 7mc6s-8x35 | Skruv M8x35 |
| 141. | 7brb-8,4x16 | Planbricka M8 |
| 142. | 684001-1100 | Bussning |
| 143. | 7mc6s-8x16 | Skruv M8x16 |
| 144. | 7fbb-8,1 | Fjäderbricka M8 |
| 145. | 684001-1035 | Sexkantstång |
| 146. | 7brb-25x12x1,5 | Planbricka |
| 147. | 7rs-10 | Låsring |
| 148. | 7PACKN.26X16 | Plastbricka 26x16x4 |
| 149. | 624001-9000 | Kugglås |
| 150. | 684001-1030 | Bromsspak 200/700 |
| 151. | 7SFL-32 | Ändavslutare 32*28 |
| 152. | 724005-2100-s | Centrallåstb sv. m mörkgrå hjul 100 |
| | 724003-2210 | Centrallåstbygel ink hjul D125 |
| 153. | 7mc6s-6x10 | Skruv M6x10 |
| 154. | 7fbb-6,1 | Fjäderbricka M6 |
| 155. | 724005-2000-s | Länkbygel sv. m. mörkgrå hjul 100 |
| | 724003-2110 | Länkb. inkl.hjul Diam.125 |
| 156. | 7mc6s-10x40 | Skruv M10x40 |
| 157. | 684001-9000 | Plastkåpa |
| 158. | 7plastnit | Plastnit |

Eurovema

Baldersvägen 38 332 35 Gislaved Sverige

Telefon: +46(0)371-39 01 00

E-post: info@eurovema.se